

# So funktioniert der Abdruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank dass Sie sich für **LETTRONIC® Medical** - powered by HKS - entschieden haben.

Sie haben heute von uns eine Abdruckbox erhalten, deren einfache Handhabung wir Ihnen im Folgenden erklären:

- 1) Legen Sie die geöffnete Box flach auf den Boden.
- 2) Stellen Sie sich bitte mit nackten Füßen links neben die Box (Stellen Sie sich neben einen Stuhl oder die Tischkante, um sich ggf. festzuhalten).





- 3) Treten Sie nun mit dem **rechten** Fuß in die **linke** Seite der Box. Bitte richtig reintreten und soviel Druck ausüben, dass der Fuß komplett im Trittschaum versinkt. Nehmen Sie den Fuß wieder heraus (Senkrecht nach oben). **Wichtig: Die Zehen gestreckt lassen und nicht zusammenkrallen!**



# So funktioniert der Abdruck

4) Wiederholen Sie das Ganze mit dem linken Fuß.

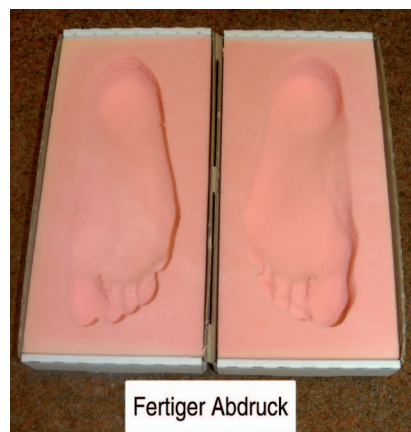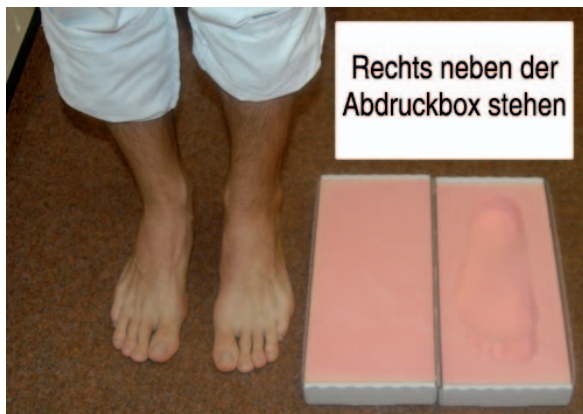

5) Nehmen Sie bitte das Formular „Was wir wissen müssen“ und füllen Sie dieses gewissenhaft aus. Anschließend legen Sie das Formular und das Rezept bitte in die Box.

6) Schließen Sie die Box wieder und kleben Sie diese bitte zu. Zum Schluss nur noch den Rücksendeaufkleber anbringen. Die Box bitte noch zum Postamt bringen, das Porto übernehmen wir für Sie.

Auf [lettermann.de/kundenservice](http://lettermann.de/kundenservice) können Sie sich bei Bedarf die Unterlagen runterladen und ausdrucken.

Ihre **LETTRONIC® Medical** werden *individuell für Sie* gefräst. Wir bitten daher um ein paar *Tage Geduld*.

© by Lettermann

