

Verehrte Kunden,
sie haben soeben Ihre individuell geformten **LETTRONIC®** Medical - powered by HKS - erhalten. Ihre **LETTRONIC®** Medical wurde speziell für den Einsatz in HKS Sicherheitsschuhen entwickelt und hergestellt.

Die **LETTRONIC®** Medical ist entsprechend der BGR 191 baumustergeprüft und nach DIN EN ISO 20345:2007 zertifiziert.

Diese Zertifizierung gilt nur in Verbindung mit einem HKS Sicherheitsschuh.

Sobald Sie einen anderen Schuh mit der **LETTRONIC®** Medical tragen, erlischt die Zertifizierung.

Sie erkennen die original **LETTRONIC®** Medical an dem Stempel, der im Fersenbereich aufgedruckt wurde.

Wir haben für Sie die wichtigsten Tipps zur Pflege und Handhabung zusammengefasst.

Tipps zur Handhabung und Pflege:

- Ihre **LETTRONIC®** Medical Präzisionseinlagen sind medizinische Hilfsmittel, die eine Korrektur Ihrer Fußstatik und somit Ihres gesamten Bewegungsablaufs bewirken sollen. Ihr Körper muss sich erst daran gewöhnen, deswegen kann es in den ersten 14 Tagen zu leichtem Muskelkater kommen.
- Der Stempel im Fersenbereich wurde mit einem Tampondruckverfahren aufgebracht und ist unbedenklich.
- Leichte Verschmutzungen der **LETTRONIC®** Medical können Sie mit etwas Seife unter lauwarmem Wasser abwaschen.
- Bei einigen Schuhen kann es vorkommen, dass Ihre **LETTRONIC®** Medical etwas zu lang sind. In diesem Fall können Sie sie selbst zurechtschneiden.
- Aus medizinischer Sicht und aus hygienischen Gründen empfehlen wir Ihnen, sich mind. einmal im Jahr neue **LETTRONIC®** Medical verschreiben zu lassen.

Bei Fragen oder Problemen können Sie uns gerne anrufen:

Lettermann GmbH

Pierre Halley

☎ 021 62/373970

otv@lettermann.de

lettermann.de

Mo.-Fr.: 8.00 bis 17.30 Uhr

